

Voorkom dat u de verkeerde traplift koopt:

een checklist voor een goedgeïnformeerde beslissing

Welke traplift past bij u?

U overweegt een traplift aan te schaffen, maar de keuze is overweldigend - in Nederland zijn alleen al deze A-merken te koop: Otolift, TKE (ThyssenKrupp), Handicare, Platinum en Acorn. En dan zijn er nog verschillende installatieopties en is de de keuze tussen nieuw of tweedehands.

Elke leverancier wil bij u over de vloer komen en iedereen geeft een ander advies. Dat maakt het hele aankoopproces tijdrovend, vermoeiend en verwarrend. Misschien heeft u zelfs al een paar leveranciers op bezoek gehad en een paar offertes gekregen en wilt u die vergelijken. Maar waar moet u dan op letten? Hoe weet u wat de juiste traplift is voor u? En dat terwijl het zeer waarschijnlijk toch al geen uitgave is waar u op zat te wachten.

Waarom is dit zo belangrijk?

Een traplift is een flinke investering die uw dagelijkse leven makkelijker en veiliger moet maken. Maar waar doe je goed aan als elke leverancier een ander advies geeft? En waar haal je betrouwbare informatie over trapliften vandaan?

Het is frustrerend om zo'n ingrijpende beslissing te moeten nemen en dan blind te moeten varen op het advies van iemand die u niet kent en die misschien vooral zijn commissie wil binnen halen. Dat begrijpen we.

Wij vinden dat u geen traplift expert zou moeten zijn om een goedgeïnformeerde aankoopbeslissing te kunnen nemen. Daarom hebben wij deze checklist voor u samengesteld samen met onze meest ervaren collega: Erik Smienk. Erik heeft Smienk Trapliften in 2012 opgericht en weet als geen ander waar u op moet letten bij de aankoop van een traplift en het vergelijken van de merken.

Er zijn in Nederlands 5 trapliftmerken te krijgen die het label A-merk verdienen: TKE (ThyssenKrupp), Otolift, Handicare, Platinum en Acorn.

Het belangrijkste dat wij hebben geleerd in de ruim 13 jaar dat wij actief zijn met deze merken is dat 1) alle A-merken goed zijn en dat er 2) flinke verschillen zijn tussen de merken.

[Plan adviesgesprek](#)

Scroll naar beneden
voor de checklist



De checklist:

1. Beoordeel de ruimte op uw trap

We beginnen met het inschatten of een traplift gaat passen op uw trap. Daar gelden namelijk vanuit de Overheid regels voor (Bbl 2024).

Meet de breedte en lengte van uw trap om te controleren of er genoeg ruimte is voor een veilige installatie. Vooral van belang hierbij is dat er voldoende ruimte overblijft om nog veilig te kunnen traplopen – bijvoorbeeld voor hulpdiensten. Over het algemeen is een breedte van 70 cm op het smalste punt van de trap voldoende, maar ook voor smallere trappen is het soms mogelijk om een traplift te plaatsen.

Daarnaast is het belangrijk om de onderdoorgang te bekijken: hoe hoog is die? Kunt u daar ook als u ca. 55 centimeter boven uw trap zou zitten nog steeds ruim onderdoor? Dit hangt natuurlijk ook af van de lengte van de persoon die de lift gaat gebruiken en hoe steil de trap omhoog gaat.

Tot slot wordt vaak geadviseerd om te kijken naar de ruimte die boven en onderaan de trap beschikbaar is om het stoeltje te parkeren. Echter wij vinden dit minder belangrijk omdat we daarvoor bijna altijd wel een oplossing hebben, zoals het parkeren van het stoeltje halverwege de trap als daar meer ruimte is. Kortom: het belangrijkste is de breedte van de traptreden en de hoogte van de onderdoorgang.

Sommige trappen vereisen speciale maatwerkoplossingen, vooral bij extra steile of smalle trappen met bochten. Een expert kan u hier goed bij helpen.

..... cm op de smalste traptrede. Ideaal is minimaal 70 cm.

2. Hoe komt de traplift op de trap te staan?

Als de trap is opgemeten is het belangrijk om te kijken hoeveel ruimte er op de traptreden overblijft na het plaatsen van een traplift. Als het om centimeters spant of een traplift wel of niet gaat passen, dan kan het maar zo zijn dat de ene leverancier u aangeeft dat er bij u geen traplift past, terwijl een ander merk u wel kan helpen.

Bijvoorbeeld: een dunne rail, zoals bij de Otolift Modul-Air, kan handig zijn omdat die minder ruimte inneemt op de trap. Echter doordat de motor van de Modul-Air zich aan de achterzijde van de rail bevindt, moet de rail vrij ver van de muur worden geplaatst.


Zo kan het zijn dat een ander merk toch beter gaat passen, omdat daar de motor anders op de rail zit en daardoor strakker tegen de muur kan worden geplaatst.

“Ik had niet verwacht dat ik er zoveel plezier van zou hebben.”




-Gert en Marja uit Krimpen a/d IJssel

Otolift Modul-Air

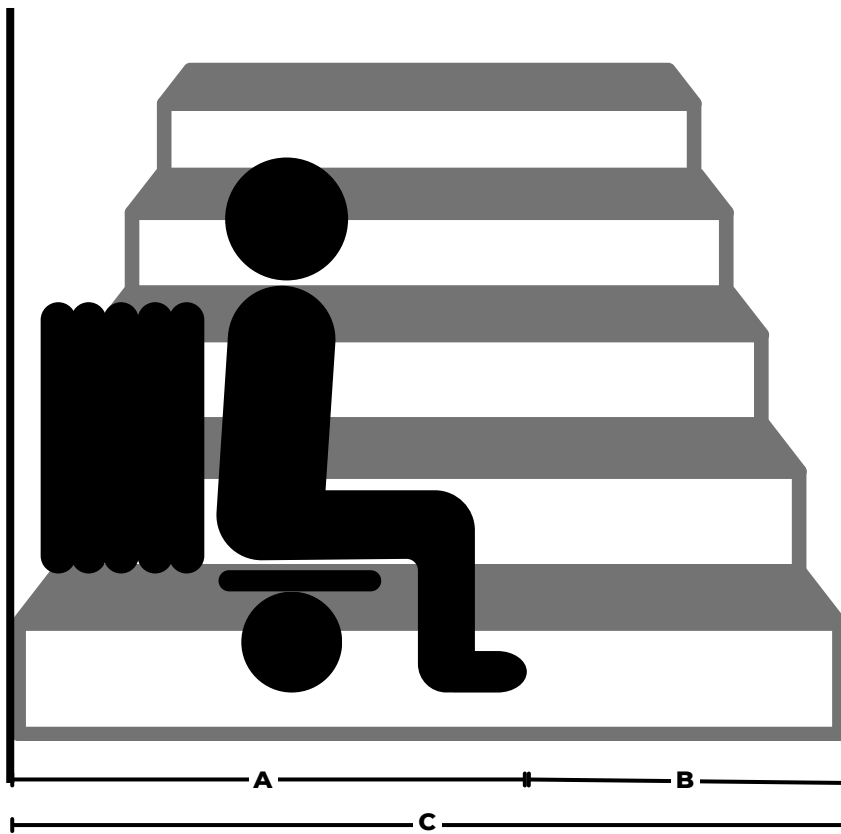

A	60 cm
B	25 cm
C	85 cm

ThyssenKrupp Flow

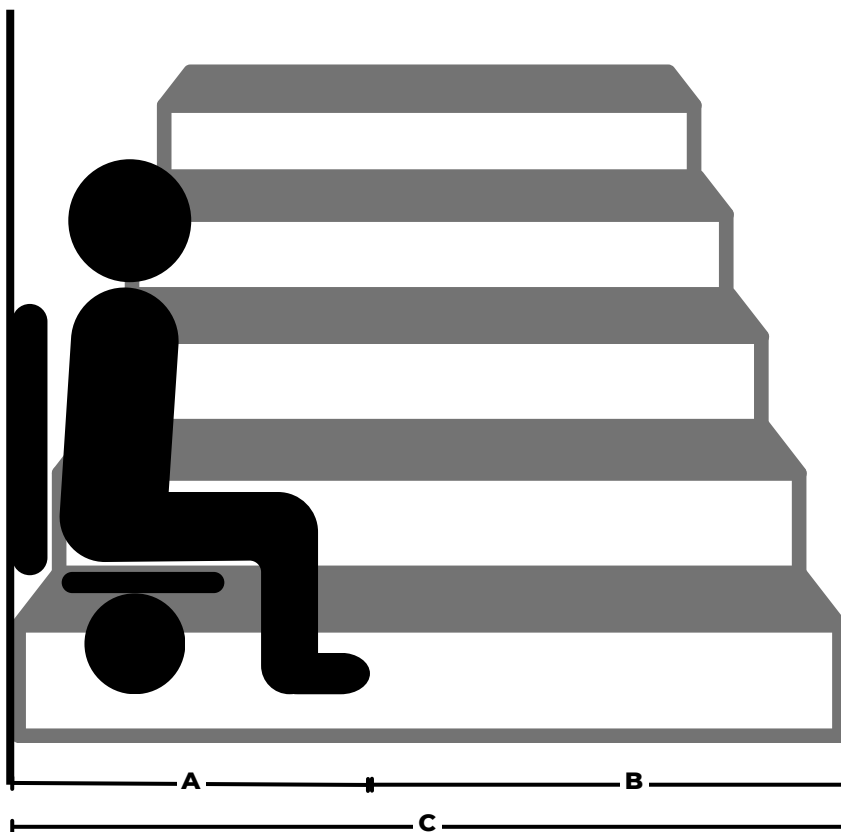

A	40 cm
B	45 cm
C	85 cm


3. Bij bochten: binnenzijde of buitenzijde?

Wanneer u een trap met bochten heeft, of een rechte trap waarbij er onder of bovenaan de trap een bocht nodig is voor het parkeren van het trapliftstoeltje, dan is het belangrijk om te weten dat niet ieder merk een traplift langs de binnenzijde van de trap kan plaatsen.


Het smalste gedeelte van de trap treden loopt altijd langs de binnenzijde van de bocht, daarom is plaatsing langs de binnenzijde vaak gewenst bij smallere trappen om de trap goed beloopbaar te houden.

Een plaatsing langs de buitenzijde is anderzijds vaak voordeliger in aanschaf en trapliften langs de buitenzijde kunnen in het algemeen een hoger gebruikersgewicht aan.

Binnenzijde:

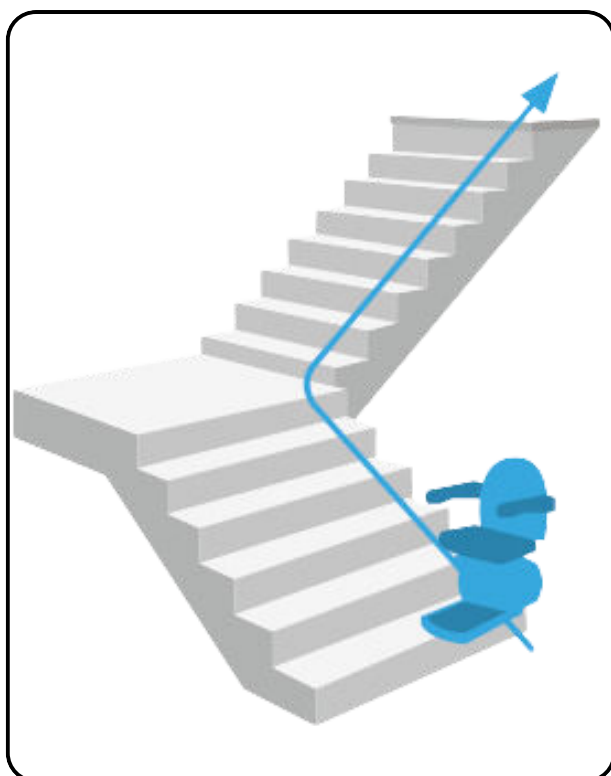

Buitenzijde:

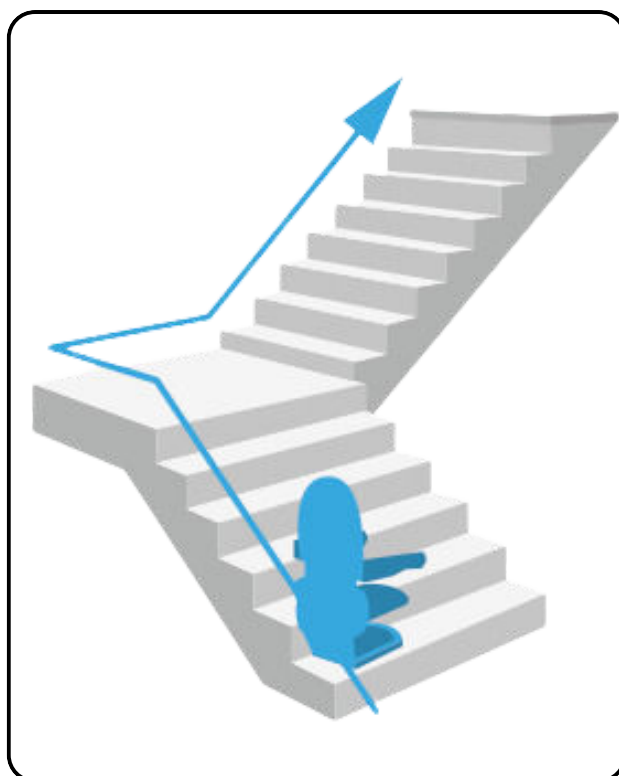

4. Wat is het maximale gebruikersgewicht dat de traplift aankan?

Het maximale gebruikersgewicht dat een traplift aan kan verschilt enorm per merk en model. Uiteraard gaat een lift niet meteen kapot als u iets zwaarder zou zijn dan het maximale gewicht, maar in onze ervaring krijgen trapliften dan wel veel vaker storingen.

Daarom raden wij altijd aan een traplift te kiezen die echt ruim aan het gewicht van de gebruiker kan voldoen.

Hieronder vindt u een overzicht van de trapliften die wij het vaakst plaatsen:

Trapliftmerk en model	Maximaal gewicht
ThyssenKrupp Flow II	125 kg
ThyssenKrupp Levant	146 kg
Otolift Modul-Air	125 kg
Otolift Two	130 kg
Acorn	120 kg
Handicare 1000	137 kg
Platinum	158 kg

5. Wat is de levertijd?

Wanneer haast is geboden, zijn trapliften die modulair worden opgebouwd vaak het snelst leverbaar. Dit komt omdat bij deze modellen de rail die over de trap loopt, bestaat uit losse onderdelen die ter plekke in elkaar worden 'gepuzzeld' in plaats van dat er een rail in zijn geheel voor u op maat wordt gemaakt.

De modulaire opties die u kunt overwegen zijn de trapliften van Acorn en Otolift Modul-Air – deze zijn alleen niet altijd de beste opties i.v.m. bijvoorbeeld het maximale gebruikersgewicht en plaatsingsopties.

De tweede optie die u heeft als er met spoed een traplift moet komen is een tweedehands traplift vaak een handige optie. Het is dan wel belangrijk dat er een lift op voorraad is met een rail die nagenoeg al past, zodat er weinig aan hoeft te worden vermaakt.

Of die op voorraad is voor uw trap kan een adviseur voor u bekijken bij u thuis. De adviseur meet met software uw trap heel precies op en voert de maten in onze magazijnsoftware in. Zo weet u direct of er iets passends is.

Wij weten niet wat de levertijd van een op maat gemaakte lift bij andere leveranciers is, maar bij ons is de gemiddelde levertijd van een traplift met een nieuwe rail zo'n 2 tot 3 weken, met af en toe uitloop tot zo'n 8 weken. Een modulaire traplift kunnen wij binnen 48 uur plaatsen.

[**Plan adviesgesprek**](#)

Soort rail	Gemiddelde levertijd
Modulaire rail	3 - 5 dagen
Aangepaste rail	2 - 4 weken
Nieuwe rail	4 - 6 weken

6. Vergelijk garantie, storingsdienst en service.

Dit is wat ons betreft het minst belangrijke punt om te vergelijken. Want eigenlijk is dit bij alle grote leveranciers goed geregeld.

De verschillen zitten bijvoorbeeld in enkele euro's per maand voor een onderhoudscontract. Of in de standaard garantie die u krijgt, die verschilt van bijvoorbeeld standaard 1 jaar tot 5 jaar.

Maar bij elke leverancier is de garantie te verlengen met een onderhoudsbeurt, waardoor u dus eigenlijk altijd levenslange garantie heeft.

[Plan adviesgesprek](#)

7. Vergelijk prijzen

Dit klinkt als een open deur waarschijnlijk, want prijzen vergelijken is natuurlijk niets nieuws onder de zon. Maar het is soms verbazingwekkend hoe vaak mensen toch op een enkel advies afgaan.

Vergelijk prijzen per merk

Zeker wanneer er in een advies maar 1 merk is besproken, is het aan te raden om in elk geval met nog twee andere merken te vergelijken. Er zitten namelijk best flinke prijsverschillen tussen de verschillende merken.

Vergelijk nieuw, gedeeltelijk en volledig tweedehands

Daarnaast is het slim om te kijken naar de opties: nieuw, volledig tweedehands of gedeeltelijk tweedehands. Vooral het verschil tussen die laatste twee kan interessant zijn. Maar let op: niet alle tweedehands trapliften-aanbieders kunnen volledig tweedehands aanbieden. Vraag daarom altijd goed na wat een leverancier voor u kan doen.

Hieronder vindt u een overzicht van onze prijzen.

Rechte traplift

nieuw	€ 2.630 – € 5.400
gedeeltelijk tweedehands	€ 2.080 – € 4.100
tweedehands	€ 1.690 – € 3.240

Traplift met bocht(en)

nieuw	€ 5.500 – € 11.400
gedeeltelijk tweedehands	€ 3.680 – € 8.795
tweedehands	€ 2.790 – € 6.490

8. Bekijk beoordelingen en ervaringen

Lees online klantreviews om te zien wat anderen zeggen over hun ervaring met de leverancier en het product. Goede reviews zijn uiteraard een teken van betrouwbaarheid en servicegerichtheid.

Maar wat nog veel interessanter is: bekijk de slechte reviews en hoe bedrijven daarmee omgaan. Gaan ze in de verdediging? Of wordt er goed naar de klacht geluisterd en wordt die op een proactieve manier opgelost? Het is best opvallend hoe vaak er helemaal niet wordt gereageerd op een negatieve review. Wat zegt dat u?

Handige webpagina's om ongefilterde reviews op te vinden zijn Google Reviews, Trustpilot en KlantenVertellen.

9. Plan een adviesgesprek

Een adviesgesprek helpt u om helderheid te krijgen over uw opties en biedt inzicht in wat het beste bij uw situatie past.

Smienk biedt gratis adviesgesprekken waarbij een expert uw trap en behoeften analyseert en met u de voor- en nadelen per A-merk voor uw situatie bespreekt. Dit is de beste manier om te beginnen met het maken van een goed geïnformeerde keuze.



Voorkom dat u een ongeïnformeerde beslissing neemt

Voorkom u dat u gebrekkig of niet-onafhankelijk advies krijgt en mogelijk de verkeerde traplift aanschaft, met alle gevolgen van dien, zoals te weinig ruimte op de trap, wat de veiligheid verder vermindert, of dat u onnodig veel geld uitgeeft.

Met ons advies maakt u een goed geïnformeerde en onafhankelijke keuze. Na de installatie van de traplift voelt u zich weer veilig op uw trap en kunt u onafhankelijk uw hele woning blijven gebruiken, wat u energie en gemoedsrust geeft.

Maak nu een adviesafpraak en ontdek welke traplift past bij uw situatie.

[Plan adviesgesprek](#)

★★★★★ 9,5 volgens onze klantbeoordelingen

Contactgegevens

☎ [0341 76 80 71](tel:0341768071)

✉ info@smienktrapliften.nl

🏠 Energieweg 10
8071 DA, Nunspeet